


	ACTIVIDADES PREVIAS AL EMPACAR	Vigencia:2018	
		Cód.:	
		Versión: 1	
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA VEGA – PUESTO DE SALUD DE NOCAIMA		Página 1 de 3	

ACTIVIDADES PREVIAS AL EMPACAR

1. Definir cuál será el método de esterilización (húmedo o en seco) a utilizar de acuerdo con las características de resistencia térmica y compatibilidad con las condiciones de esterilización de los elementos.
2. Clasificar los elementos a esterilizar según el método a emplear para esterilizarlos, se recomienda también incluir aspectos como: forma, tipo, cantidad para tenerlos en cuenta en el momento del empaque y cargue del esterilizador.
3. Limpie y seque la superficie en donde se va a cortar papel y empaclar el material. Se puede desinfectar la superficie de trabajo con alcohol antiséptico al 70%
4. Realizar el lavado de manos con agua y jabón como se indica dentro del manual general de bioseguridad y séquelas con papel desechable.
5. Verificar que todo el material antes de ser empacado este en buen estado, seco y limpio, que se halla lavado y este desinfectado
6. Revisar que los indicadores o cinta testigo no este deteriorada o que haya ocurrido un cambio de color.
7. Preparar y verificar los empaques a utilizar:
 - Recortar el papel crepado, papel grado médico o el papel aluminio en un tamaño suficiente para envolver el material. Tener en cuenta que el tamaño del papel debe ser el suficiente para evitar que el empaque quede ajustado sobre el elemento.
 - Si van a utilizarse varias envolturas, es recomendable que el color de la envoltura interior y exterior sean diferentes (evitar el uso de tonos similares), para que facilite identificar daños en el empaque exterior cuando se revisa la carga luego de terminar el procedimiento de esterilización.
 - Inspeccionar los empaques rígidos que van a utilizarse para guardar el material a esterilizar (Ej.: caja metálica), y verificar que estén en buenas condiciones, limpios y secos.
 - Revisar las bolsas de papel o de polipropileno para esterilización, asegurado que no estén rotas o rasgadas. Y revisar que el indicador testigo de la bolsa esté en buenas condiciones (no se halla despegado o cambiado de color).
8. Antes de envolver en papel el material o instrumental corto punzante, envolver sus filos y puntas con algodón o protectores (si es posible que se quemem no se recomienda en caso de realizar esterilización en seco). No realizar esta actividad si se afecta la esterilidad o si el empaque no lo requiere (Ej.: cajas en polipropileno, bolsas en polipropileno)

	ACTIVIDADES PREVIAS AL EMPACAR	Vigencia:2018	
		Cód.:	
		Versión: 1	
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA VEGA – PUESTO DE SALUD DE NOCAIMA		Página 1 de 3	

EMPAQUE DE MATERIAL



1. Envoltura diagonal empleando papel

- Cortar el papel en un cuadrado de tamaño adecuado que permita colocar el elemento a esterilizar en su centro, asegurando que los bordes estén en el ángulo correcto con las diagonales del pliegue de papel.
- Levantar el pliegue del papel sobre la parte más ancha del elemento a esterilizar, de tal forma que quede cubierto completamente. Se debe formar un triángulo que permitirá la apertura del paquete bajo condiciones asépticas (manejo que asegura la esterilización).
- Repetir el paso anterior, pero en el sentido opuesto.
- Verificar que se forme un bolsillo abierto en la parte superior del empaque.
- Tomar la parte que queda del pliegue y pasarla sobre el elemento.
- Colocar la punta del papel en el bolsillo, y doblarla dejando una parte saliendo del empaque. Cerrar el paquete con cinta tipo de enmascarar y colocar la cinta química testigo. Marcar el rotulo y luego pegarlo al paquete

Nota: En lo posible utilizar la cinta indicadora para realizar el sellado del empaque. Si el empaque se rompe debe iniciarse desde el paso 1. No rotular directamente sobre el paquete.

2. Envoltura utilizando bolsas

- Verificar que la bolsa a utilizar pueda ser empleada bajo el método de esterilización a ser utilizado (revisar la ficha técnica del fabricante).
- Revisar que las medidas de la bolsa sean adecuadas respecto al elemento que se introducirá en ellas. La bolsa no debe quedar tensionada por el elemento cuando esta se cierre.
- No sobrellenar las bolsas, ya que esto puede romperlas.
- Doblar y sellar los bordes de las bolsas según lo especifica el fabricante. Tener en cuenta que:
 - Existen bolsas autosellables.
 - Las que no son autosellables pueden cerrarse mediante:
 - La aplicación en el borde abierto calor y presión empleando una máquina de sello hermético.
 - Realizando el cierre a mano con cinta tipo de enmascarar o la indicadora, asegurando que sea hermético.
 - Rotular el empaque, no colocar el rotulo sobre el sello.

	ACTIVIDADES PREVIAS AL EMPACAR	Vigencia:2018	
		Cód.:	
		Versión: 1	
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA VEGA – PUESTO DE SALUD DE NOCAIMA		Página 1 de 3	

Nota: Las bolsas con una parte transparente permiten ver el Instrumental

Elaborado por:	Revisado Por :	Aprobado Por :
LIBIA CASTILLO HERNANDEZ	MOLCHIZU ARANGO GIRALDO	HERNANDO DURAN CASTRO
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERIA	Cargo: CALIDAD	Cargo: GERENTE
Fecha: Diciembre 2017	Fecha: Diciembre2017	Fecha: Diciembre 2017